



Mini PEGASO A-Cough PERC

Für spontan atmende und
beatmungspflichtige Patienten

Unterstützung durch mechanische In- und Exsufflator

Der mechanische In- und Exsufflator soll die Patienten beim Abhusten bronchopulmonaler Sekretablagerungen durch graduelle Anwendung eines Überdruckes auf die Atemwege und anschließendes schnelles Umschalten auf einen Unterdruck unterstützen.

Hierzu wird von dem netzbetriebenen Tischgerät über Beatmungsschlauch und Gesichtsmaske sowie Mundstück oder Endotracheal- oder Tracheostomiekanüle ein schneller Druckwechsel erzeugt, welcher in der Folge einen hohen expiratorischen Flow aus den Lungen verursacht und so einen Hustenstoß simuliert.

Diese Technik wird als mechanische Insufflation-Exsufflation bezeichnet.

Produktbeschreibung: Der **Mini PEGASO A-Cough PERC** verfügt über die Hustentherapie mit Triggertechnologie (EasyStart, AutoSync) und optional einer Oszillation während der Insufflation und/oder Exsufflation.

Vorteile

- Nichtinvasiv und invasiv einsetzbar
- Geeignet für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
- Anwendung mit Maske, Mundstück oder Tracheoanschluss
- Für spontan atmende und beatmungspflichtige Patienten
- Im Percussor mit einem Beatmungsgerät kombinierbar
- Im Percussor mit einem Vernebler kombinierbar
- Interner Akku: 3 Stunden Therapie
- Geringes Gewicht: 3,2 kg

Indikation

- Husteninsuffizienz
- Sekretretention
- Amyotrophe Lateralsklerose
- Spinale Muskelatrophie
- Muskeldystrophie
- Myasthenia gravis
- Poliomyelitis
- Hohe Querschnittslähmung
- Rückenmarksverletzung
- Chronische obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)
- Rezidivierende Pneumonien

Kontraindikationen

- Bullöses Lungenemphysem
- Rezidivierender Pneumothorax
- Pneumomediastinum
- Sowie ein kurzzeitig zurückliegendes Barotrauma

Der
Mini PEGASO A-Cough PERC
hält zur klassischen **Hustentherapie**
auch eine **Perkussionstherapie** vor, bei
der das Sekret aus den peripheren
Atemwegen durch kurze Luftstöße mit fest
eingestelltem positiven Druck und abwech-
selndem Nulldruck, mobilisiert wird.

**Diese Therapiearten können
unabhängig voneinander oder als
Kombitherapie durchgeführt
werden.**



Mini PEGASO A-Cough PERC



Lieferumfang

Mini PEGASO A-Cough PERC, Patientenschlauchsystem einschließlich Bakterienfilter, eine große Maske für Erwachsene, Benutzerhandbuch, Tasche, GeräteeingangsfILTER

Bestellinformationen


Bezeichnung	Hilfsmittelnummer	VE	Bestell-Nr.
Mini PEGASO A-Cough PERC Hustenassistent + Perkussion (inkl. Akku)	14.24.08.3007	1	40435
Mini PEGASO A-Cough PERC Expirationsventil Percussion	14.99.99.0900	5	40266
Mini PEGASO A-Cough PERC GeräteeingangsfILTER	14.99.99.1048	1 Pack 5	40274

Bestellinformationen für Artikel Perkussionstherapie in Verbindung mit Beatmung

Bezeichnung	Größe	VE	Bestell-Nr.
Passy Muir Ventil, grün, Beatmung, PMV 007	–	1	18297
Adapter für Passy Muir Ventil	–	1	18874
Intersurgical T-Stück	22 mm AD – 15 mm ID / 22 mm AD – 22 mm ID	1	41612

Beim Kauf eines Gerätes erhält der Kunde das angegebene Zubehör kostenlos dazu.

Wir erstellen Ihnen auch gerne ein passendes Leasing- bzw. Mietangebot für das Gerät.

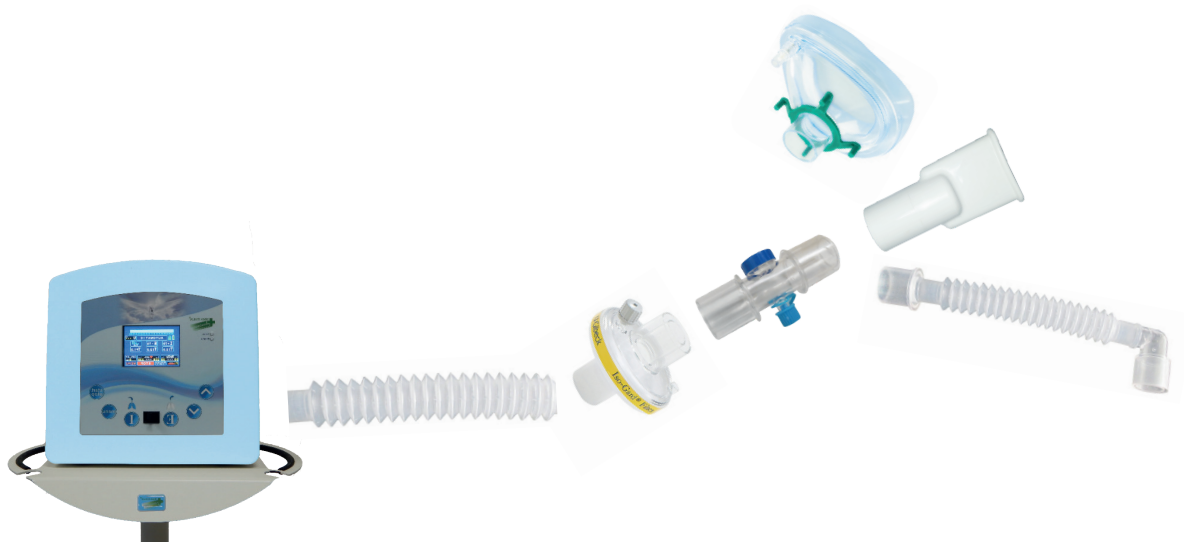

Im Percussor Modus **immer** das **Expirationsventil DA-PEG-PERC** (40275) hinzufügen.
Der antibakterielle Filter kann alternativ auch direkt an das Gerät angeschlossen werden!

