

GEBRAUCHSANWEISUNG

1 Zweckbestimmung

Die SERVOX® Elasto Tube wird in eine künstlich angelegte Atemöffnung (Tracheostoma) eingesetzt und gewährleistet so das Stabilisieren und Offenhalten des Tracheostomas.

Der SERVOX® Elasto Tube Clip dient zur sicheren Befestigung der SERVOX® Elasto Tube Innenkanüle an der SERVOX® Elasto Tube Außenkanüle,

Hinweis

Der SERVOX® Elasto Tube Clip ist eine Komponente der SERVOX® Elasto Tube vent und darf ausschließlich in Kombination damit verwendet werden.

Lesen Sie die vorliegenden ergänzenden Anwendungshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

2 Anwendung

Den SERVOX® Elasto Tube Clip vor jeder Benutzung auf evtl. Beschädigungen oder Verformungen überprüfen. Beschädigte oder verformte Clips nicht benutzen!

Nach dem Einsetzen der SERVOX® Elasto Tube vent (Gebrauchsanweisung der SERVOX® Elasto Tube vent beachten), Kanülensitz und Fixierung von Außen- und Innenkanüle



Abbildung 1 SERVOX® Elasto Tube Clip

prüfen. Anschließend den SERVOX® Elasto Tube Clip zur Sicherung der Fixierung von oben über Kanülenschild der Außenkanüle und den am Kanülenschild anliegenden Rand der Innenkanüle schieben. (siehe Abbildung 1.) Sicherstellen, dass der Clip sicher und fest sitzt, bevor ein Beatmungsgerät angeschlossen wird.

Zum Entfernen, den SERVOX® Elasto Tube Clip wieder nach oben abziehen.

Der SERVOX® Elasto Tube Clip sollte mindestens bei jedem Innenkanülenwechsel gereinigt werden.

3 Reinigung und Lagerung

Der SERVOX® Elasto Tube Clip sollte vor Erstbenutzung, nach jeder Nutzung (bei Innenkanülenwechsel) und bei Bedarf gereinigt werden.

Den Clip nicht auskochen oder sterilisieren und keine aggressiven Haushaltsmittel verwenden.

Den Clip mit handwarmem, fließendem Wasser sorgfältig abspülen. Anschließend den Clip (am besten zusammen mit der Trachealkanüle) mindestens 10 Minuten lang in einer Reinigungslösung aus handwarmem Wasser und einer handelsüblichen, pH- und duftneutralen Waschlotion einweichen, um eventuelle Verkrustungen oder Verborstungen zu lösen. Danach den Clip mehrfach und gründlich unter fließendem, klarem Wasser abspülen, um eventuelle Rückstände der Waschlotion zu entfernen.

Der Clip sollte sauber, trocken, staubfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.

4 Nutzungsdauer und Entsorgung

Die Nutzungsdauer des SERVOX® Elasto Tube Clips hängt von der Häufigkeit der Nutzung und der Reinigung ab. Er muss spätestens bei stärkeren Abnutzungserscheinungen ersetzt werden und kann über den Restmüll entsorgt werden. Die Verpackung kann über die Wertstofftonne entsorgt werden.

5 Haftungsausschluss

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder bei Manipulation am Produkt übernimmt der Hersteller im Schadensfall keine Haftung.

6 Symbole

	CE-Kennzeichen
	Hersteller
	Bestellnummer
	Chargennummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen
	Trocken aufbewahren
	Temperaturbegrenzung
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Inhalt
	Duales Sammel- und Verwertungssystem

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX® Elasto Tube Clip	1	–	28390

30138/Version 2023-04-26

Orbisana
GESUNDHEITSWELT

Ersatzteil
zur SERVOX® Elasto Tube *vent*

SERVOX® Elasto Tube Clip



Orbisana Healthcare GmbH

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | Germany
Tel. +49 (0)2241 9322-0 | Fax -277
info@orbisana-hc.de | www.orbisana-hc.de

30138/Version 2023-04-26