
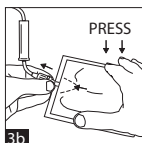
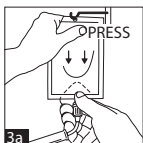
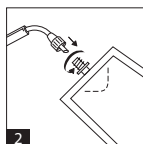


GEBRAUCHSANWEISUNG


SERVOSAN® Monobag-Beutel

Schließen Sie das Überleitungsgerät an und drehen die Rollenklemme zu.

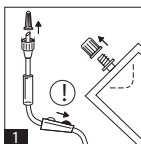

Der Beutel kann hängend oder liegend geöffnet werden. Halten Sie dazu den Auslauf fest und drücken gleichzeitig mit der anderen Hand auf den oberen bzw. hinteren Bereich des Beutels um die Peelnaht zu öffnen.

Applizieren Sie das Produkt nach Öffnen der Rollenklemme.

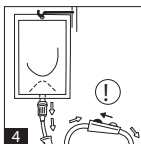

Hergestellt für:
Orbisana Healthcare GmbH
Biberweg 24 – 26
53842 Troisdorf | Germany
Tel. +49 (0)2241 9322-0
info@orbisana.de | www.orbisana.de

